


INSTRUÇÕES DE USO DO X-PRAY

IMAGENS ILUSTRATIVAS: PASSO-A-PASSO:

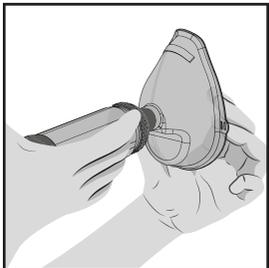


1 - ENCAIXE A MÁSCARA OU A BOQUILHA NO BICO DO ESPAÇADOR X-PRAY.


OBS: BOQUILHA DISPONÍVEL SOMENTE NOS MODELOS ADOLESCENTE E ADULTO.



2 - RETIRE A TAMPA DO AEROSSOL E AGITE-O BEM PARA ASSEGURAR A LIBERAÇÃO ADEQUADA DA MEDICAÇÃO.

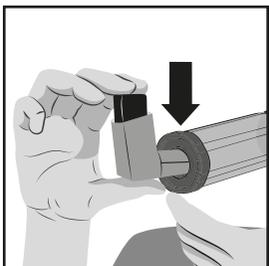

3 - CONECTE O AEROSSOL NO ENCAIXE UNIVERSAL DO ESPAÇADOR X-PRAY, CONFORME ILUSTRAÇÃO AO LADO.

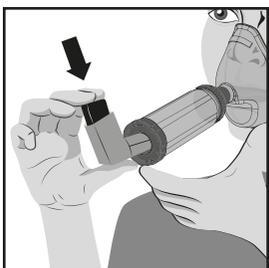

4 - POSICIONE A MÁSCARA NO ROSTO OU A BOQUILHA E PRESSIONE O JATO DO AEROSSOL APENAS UMA VEZ.

(NÃO SE AUTOMEDIQUE / RESPEITE A PRESCRIÇÃO DO SEU MÉDICO)



5 - INSPIRE LENTAMENTE O MEDICAMENTO PELA BOCA, SEGURANDO A RESPIRAÇÃO DE 5 A 10 SEGUNDOS E EXPIRE NORMALMENTE.

(APÓS O USO DO AEROSSOL GUARDE-O EM LOCAL APROPRIADO)
(APÓS O USO DO X-PRAY FAÇA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS PEÇAS)

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ASSEPSIA

1 - ANTES E APÓS A UTILIZAÇÃO DO X-PRAY DESACOPLE O ENCAIXE UNIVERSAL, A MÁSCARA DA CÂMARA, O BICO E A MEMBRANA CONJUGADA. (OBSERVE A IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS NA ILUSTRAÇÃO ABAIXO).

2 - LAVE TODAS AS PEÇAS COM ÁGUA E DETERGENTE OU SABÃO NEUTRO, ENXÁGUE AS PEÇAS COM ÁGUA FILTRADA.

3 - COMECE A ASSEPSIA MERGULHANDO AS PEÇAS EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA Morna, COM SOLUÇÃO GERMICIDA A SUA ESCOLHA, POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS.


PODE SER UTILIZADO TAMBÉM SOLUÇÃO A BASE DE VINAGRE (ÁCIDO ACÉTICO), NA PROPORÇÃO DE DUAS COLHERES DE SOPA PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA OU ÁGUA SANITÁRIA NA PROPORÇÃO DE UMA COLHER DE SOPA, PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA.

4 - ENXÁGUE AS PEÇAS COM ÁGUA FILTRADA E RETIRE O EXCESSO DE ÁGUA E DEIXE SECAR NATURALMENTE, NÃO UTILIZE ÁLCOOL OU ABRASIVOS PARA LIMPEZA BEM COMO PANO, TOALHA DE PAPEL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE TECIDO PARA SECAR O INTERIOR DA CÂMARA.

5 - ACOPLAR NOVAMENTE O ENCAIXE UNIVERSAL, A MEMBRANA CONJUGADA, O BICO E A MÁSCARA NA CÂMARA.

6 - CONFIRA SE O ESPAÇADOR ESTÁ SECO ANTES DO USO.

ATENÇÃO NA REMONTAGEM DAS PEÇAS

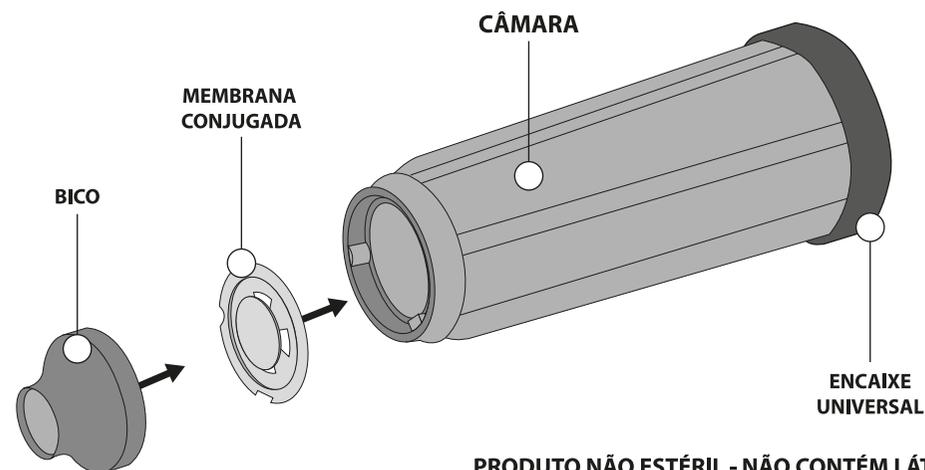

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - NÃO CONTÉM LÁTEX

CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE O USO DO X-PRAY

PRECAUÇÕES:

AO USAR O ESPAÇADOR X-PRAY PELA PRIMEIRA VEZ OU TODA VEZ ANTES DE USAR, LAVE-O SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ASSEPSIA.

RESTRIÇÕES:

NÃO SE AUTOMEDIQUE E RESPEITE A PRESCRIÇÃO DO SEU MÉDICO.

LEIA O GUIA RÁPIDO DE USO

ADVERTÊNCIAS:

O X-PRAY NÃO DEVE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS PARA QUALQUER TIPO DE BRINCADEIRAS, MESMO QUANDO O PRODUTO ESTIVER FORA DE USO.

O X-PRAY NÃO SE DESTINA A UTILIZAÇÃO POR PESSOAS (INCLUSIVE CRIANÇAS) COM CAPACIDADE FÍSICA, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU POR PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA.

NÃO DEIXAR O ESPAÇADOR X-PRAY OU QUALQUER MEDICAÇÃO AO ALCANCE DE CRIANÇAS. O ESPAÇADOR X-PRAY DEVE SER USADO SEMPRE COM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. A MEMBRANA CONJUGADA É ESSENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO, PORTANTO NÃO AS RETIRE A NÃO SER NO MOMENTO DA LIMPEZA.

CUIDADOS ESPECIAIS:

SE O MÉDICO PRESCREVER DOIS OU MAIS JATOS DA MEDICAÇÃO, AGUARDE 30 SEGUNDOS PARA APLICAR O SEGUNDO JATO. NÃO ESQUECER DE AGITAR O AEROSSOL ANTES DE CADA JATO.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

TEMPERATURA: -20 °C a +60 °C;
UMIDADE: 10 a 95% UR - SEM CONDENSAÇÃO.
PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 700hPa a 1060hPa

CÓDIGO: 4297.001.00

ATENÇÃO



- JAMAIS UTILIZE ÁGUA FERVENTE, ESTERELIZANTES, FORNO DE MICROONDAS E AUTOCLAVES, POIS ISTO IRÁ DANIFICAR AS PEÇAS PLÁSTICAS, QUE NESTE CASO NÃO SERÃO COBERTAS POR GARANTIA.

GARANTIA:

06 MESES (PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO)

SONICLEAR - SAÚDE E BEM ESTAR

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

Fone: 11 2060-9500 / 11 2060-9510

Comercial / Administrativo:

Fone: 11 2591-6000 - Fax: 11 2274-6456

soniclear@soniclear.com.br

www.soniclear.com.br

Nome técnico: Espaçador.

Nome e modelo comercial: X-Pray.

Registro no MS/Anvisa: Nº 80023140012

Responsável técnico: Ednilson André da Silva

CREA-SP nº 5061754762-SP

Produto não perecível.

Validade: Indeterminada.


Fabricado por: Soniclear Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.

CNPJ: 58.511.270/0001-47.

Sede: Rua Basílio da Cunha, 882

Bairro Cambuci - CEP: 01544-001 - São Paulo - SP.

espaçador unidirecional
X·pray
DIRETO NO X DO PROBLEMA

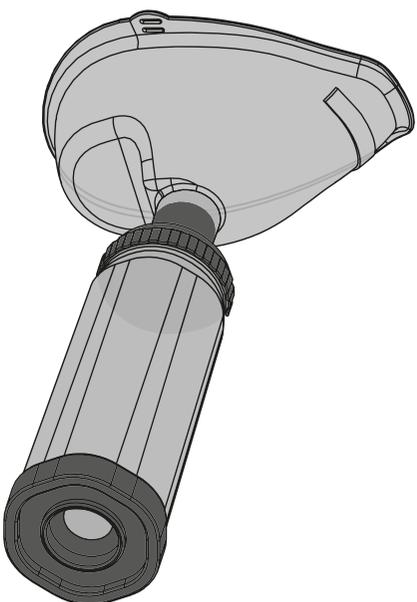

GUIA RÁPIDO
DE USO

